

# LinfoVir<sup>®</sup> plus

spray nasale

---

## INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

---

LinfoVir<sup>®</sup> Plus spray nasale è un dispositivo medico contenente Resveratrolo da *Polygonum cuspidatum* e carbossimetilbetaglucano in soluzione salina tamponata. Il prodotto, attraverso un utilizzo topico nasale, può risultare utile in quei soggetti che manifestano un'elevata tendenza ad infiammazioni e/o infezioni delle cavità nasali e delle prime vie respiratorie.

### INDICAZIONI

Dispositivo medico utile per la rimozione dei residui di muco e per facilitare la respirazione. Coadiuvante nel trattamento delle forme infiammatorie delle cavità nasali.

### COMPOSIZIONE

Acqua depurata, carbossimetilbetaglucano, *Polygonum cuspidatum* rizoma titolato al 98% in resveratrolo, potassio fosfato bibasico, mannitolo, glicole propilenico, sodio cloruro, potassio fosfato, nipagina sodica.

### MODO D'USO

1-2 spruzzi per narice 3 o 4 volte al giorno. Al primo utilizzo del prodotto, avvitare completamente il tappo del flaconcino in senso orario sino a fine corsa, in modo che la polvere contenuta nel tappo cada nel liquido. Agitare energicamente e sostituire il tappo con l'apposito irroratore contenuto nella confezione avvitandolo a fondo.



Togliere la protezione dell'irroratore e spruzzare nelle narici. Agitare prima di ogni utilizzo. Nei bambini più piccoli è consigliabile far eseguire l'irrorazione da un adulto. La presenza di Resveratrolo (estratto dalla pianta *Polygonum cuspidatum*) può determinare una colorazione leggermente ambrata del prodotto senza comprometterne la qualità.

## AVVERTENZE

**Non usare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.** In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Richiudere bene il dispositivo dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

Il prodotto ricostituito è stabile per 30 giorni. Utilizzare il prodotto ricostituito entro 30 giorni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso del flaconcino è strettamente personale. Per donne in gravidanza o in allattamento si raccomanda di sentire il parere del medico.

## EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati.

## CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con tappo dosatore e irroratore nasale.

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Maggio 2021



Via Campello sul Clitunno 34 - 00181 Roma  
[www.noosif.com](http://www.noosif.com)



Verifica le disposizioni del tuo Comune

### 1 Inquadra con lo smartphone il QR Code



### 2 Scopri l'intera linea di prodotti Nóos



IMMUNITARIO



RESPIRATORIO



GASTROINTESTINALE



CAVO ORALE



UDITIVO

