

InfoVir® Iperwash

Dispositivo medico

8 flaconi monodose da 60 ml
+1 erogatore nasale

InfoVir® Iperwash è un dispositivo medico a base di soluzione salina ipertonica tamponata a pH 6, costituito da un sistema meccanico appositamente studiato per liberare ed igienizzare la cavità rinofaringea attraverso le narici, svolgendo un'azione osmotica e decongestionante.

INDICAZIONI

InfoVir® Iperwash è una soluzione salina ipertonica utile in tutti quei casi di congestione rinofaringea e di flogosi delle cavità nasali con accumulo e ristagno di muco. Genera un'onda igienizzante in grado di pulire a fondo aiutando a ripristinare la pervietà delle vie aeree superiori e facilitando il respiro.


COMPOSIZIONE

Acqua depurata, potassio fosfato monobasico 1,70%, potassio fosfato bibasico 0,68%, sodio cloruro 0,68%. Senza conservanti.

COME FUNZIONA

Il suo speciale terminale nasale consente la completa chiusura della narice producendo, alla pressione del soffiato, un'onda igienizzante in grado di raggiungere il rinofaringe e, attivando il riflesso palatale, uscire dalla narice controlaterale.

MODO D'USO

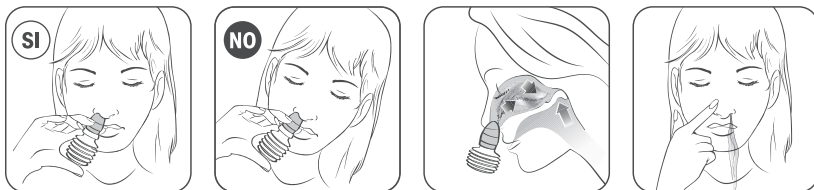

1. Prima di utilizzare il prodotto soffiare bene il naso.
2. Aprire un flacone e versare circa una metà del suo contenuto nel soffiato erogatore. Richiudere quindi il soffiato con il terminale nasale blu, spingendolo a fondo fino a farlo arrivare a contatto con la base della ghiera.
3. Appoggiare l'erogatore alla narice avendo cura di creare una perfetta aderenza che ne consenta la totale chiusura.
4. Premere fino in fondo il soffiato per erogare il prodotto.
5. Utilizzare la seconda metà della soluzione salina per effettuare il lavaggio attraverso l'altra narice.
6. Al termine del procedimento rimuovere il terminale dal soffiato erogatore, lavare accuratamente con acqua entrambi i componenti avendo cura di eliminare gli eventuali residui di soluzione salina che potrebbero, alla lunga, alterare le caratteristiche del dispositivo erogatore. Lasciare asciugare all'aria e riporre il tutto in luogo pulito ed asciutto.

COME E QUANDO USARLO

Utilizzare il prodotto due volte al giorno (mattina e sera), al bisogno o su consiglio del medico. Il singolo flacone monodose contiene una quantità di soluzione sufficiente per un lavaggio completo da entrambe le narici. Se si ritiene opportuno, tenere tra le mani il soffiato riscaldando leggermente la soluzione prima dell'erogazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro correttamente conservato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per l'uso del prodotto nei bambini al di sotto dei 2 anni chiedere il parere del medico. Non utilizzare in pazienti con traumi alle orecchie. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso e consultare il medico. L'uso dell'erogatore è strettamente personale. Utilizzare la soluzione solo per il trattamento delle vie aeree superiori; utilizzare l'erogatore solo con la soluzione in dotazione. Dispositivo monouso.

Non iniettabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per le donne in gravidanza o allattamento si raccomanda di sentire il parere del medico. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. Si consiglia di non assumere farmaci o altri dispositivi prima o subito dopo il lavaggio, onde evitare che questi vengano eliminati insieme alle secrezioni. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico, al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si ha sede.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati. Ad oggi non si è a conoscenza di interazioni con altri dispositivi, sostanze o medicinali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 erogatore a soffiato
- 1 terminale nasale blu morbido adattabile a tutte le narici
- 8 flaconi monodose di LinfoVir® iperwash soluzione salina ipertonica tamponata a pH 6

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Rev 02 del 07/2023

Raccontaci la tua esperienza

» Inquadra il QR Code per rispondere al questionario



» e per scoprire l'intera linea di prodotti Nóos



Gastrointestinale



Respiratorio



Immunitario



Uditivo



Cavo orale



Malattie rare



Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosif.com

CE
0426

NÓOS PER L'AMBIENTE

PAP 22

FOGLIETTO

CARTA

Verifica le disposizioni del tuo Comune