

InfoVir[®] plus

spray nasale

Dispositivo medico

Flacone da 30 ml con tappo dosatore

LinfoVir[®] Plus spray nasale è un dispositivo medico contenente Resveratrolo da *Polygonum cuspidatum* e carbossimetilbetaglucano in soluzione salina tamponata. Il prodotto, attraverso un utilizzo topico nasale, può risultare utile in quei soggetti che manifestano un'elevata tendenza ad infiammazioni e/o infezioni delle cavità nasali e delle prime vie respiratorie.

INDICAZIONI

Dispositivo medico utile per la rimozione dei residui di muco e per facilitare la respirazione. Coadiuvante nel trattamento delle forme infiammatorie delle cavità nasali. Indicato per adulti e bambini a partire dai 3 anni di età.

COMPOSIZIONE

Acqua depurata q.b., carbossimetilbetaglucano 0,0066%, *Polygonum cuspidatum* rizoma titolato al 98% in resveratrolo 0,0507%, potassio fosfato bibasico, mannitolo, glicole propilenico, sodio cloruro 0,2298%, potassio fosfato, nipagina sodica.

MODO D'USO

1-2 spruzzi per narice 3 o 4 volte al giorno.

Al primo utilizzo del prodotto, avvitare completamente il tappo del flaconcino in senso orario sino a fine corsa, in modo che la polvere contenuta nel tappo cada nel liquido. Agitare energicamente e sostituire il tappo con l'apposito irroratore contenuto nella confezione avvitandolo a fondo.



Togliere la protezione dell'irroratore e spruzzare nelle narici. Agitare prima di ogni utilizzo. Dopo l'uso pulire l'irroratore e rimettere il cappuccio protettivo sul beccuccio. Nei bambini più piccoli è consigliabile far eseguire l'irrorazione da un adulto. La presenza di Resveratrolo (estratto dalla pianta *Polygonum cuspidatum*) può determinare una colorazione leggermente ambrata del prodotto senza comprometterne la qualità.

AVVERTENZE

Non usare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Richiudere bene il dispositivo dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Il prodotto ricostituito è stabile per 28 giorni. Utilizzare il prodotto ricostituito entro 28 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso del flaconcino è strettamente personale. Per donne in gravidanza o in allattamento si raccomanda di sentire il parere del medico. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata. Si consiglia di non assumere farmaci o altri dispositivi prima o subito dopo l'utilizzo del prodotto, onde evitare che venga eliminato insieme alle secrezioni. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo medico, al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si ha sede.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati. Ad oggi non si è a conoscenza di interazioni con altri dispositivi, sostanze o medicinali.

CONFEZIONE

Flacone da 30 ml con tappo dosatore e irroratore nasale.

Ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Rev 1 del 11/2023

Raccontaci la tua esperienza

» Inquadra il QR Code per rispondere al questionario



» e per scoprire l'intera linea di prodotti Nóos



Gastrointestinale



Respiratorio



Immunitario



Uditivo



Cavo orale



Malattie rare



Via Campello sul Clitunno, 34 - 00181 Roma
www.noosif.com



0426



Verifica le disposizioni del tuo Comune

